



Согревающая подушка ICE



1. **Тип товара:** грелка, разогреваемая в микроволновой печи

2. **Характеристики**

- Размер: 240 x 140 x 20 мм
- Вес: 530 г
- Время разогрева в микроволновой печи:

600 Вт – 4 минуты

700 Вт – 3,5 минуты

900 Вт – 3 минуты

Страна-изготовитель: Япония

3. **Сфера применения**

Грелка отдает тепло на протяжении 8 часов. Рекомендуется располагать грелку таким образом, чтобы она соприкасалась с телом по крайней мере через один слой ткани.

Устройство может использоваться для согревания в холодное время года, а также при коликах у младенцев, мышечной, головной и зубной боли.

4. **Способ применения**

Извлеките из коробки целлофановый пакет с твердым наполнителем. Расправьте углы пакета и поместите его в микроволновую печь для нагрева.



Время нагрева зависит от мощности микроволновой печи:

- 4 минуты при мощности 600 Вт
- 3 минуты 30 секунд при мощности 700 Вт
- 3 минуты при мощности 900 Вт

После нагрева извлеките пакет из микроволновой печи, удерживая его за уголки. После нагрева вещество, содержащееся в пакете, частично перейдет в жидкое состояние.

ОСТОРОЖНО! Пакет горячий.

Осторожно подвернув уголки в верхней и нижней частях пакета, поместите его в матерчатый чехол.



Застегните чехол на липучки. Грелка готова к использованию.

Во избежание низкотемпературных ожогов между телом человека и грелкой всегда должен быть хотя бы один слой ткани.

5. Меры предосторожности

- Дети и люди с ограниченными возможностями могут использовать грелку только под надзором.
- Не вскрывайте целлофановый пакет.
- Не допускайте перегрева жидкости – при нагреве хотя бы небольшая часть вещества должна оставаться в твердом состоянии.
- При попадании вещества на кожу немедленно промойте место контакта теплой водой.
- Не храните грелку в холодильнике.